


# Methofill® Pen (Metotrexato)

## INFORMACIÓN PARA AUTOINYECTARSE

### DISPOSITIVO DE UN SOLO USO

Lea estas instrucciones y la guía del medicamento atentamente antes de utilizar Methofill® Pen.

Este dispositivo requiere formación por un profesional sanitario. Su médico o farmacéutico debe enseñarle cómo administrar Methofill® Pen antes de autoinyectarse. Si no se lo han explicado o tiene cualquier pregunta, contacte con su médico o farmacéutico.

 Almacenar a menos de 30°C.  
Almacenar el inyector listo para su uso en su envoltorio original para protegerlo de la luz.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar si el envoltorio está dañado o se ha abierto previamente.

### METHOFILL® PEN EN UN VISTAZO



### ANTES DE EMPEZAR

- Compruebe la fecha de caducidad del paquete. **No usar** si está caducado.
- Escoja un lugar limpio y bien iluminado para administrar la medicación.
- Coja una toallita impregnada en alcohol y un contenedor de agujas y residuos citotóxicos.



### PREPARACIÓN

**LAVARSE LAS MANOS**  
Lávese bien las manos con jabón y agua caliente.

**ESCOGER LA ZONA DE LA INYECCIÓN**  
Abdomen o muslo si se inyecta usted mismo/a, o parte posterior del brazo si un profesional sanitario o cuidador le ayudan.

**ZONA DE INYECCIÓN LIMPIA**  
Utilice una toallita con alcohol para limpiar la zona de la inyección. Déjela secar al aire.



### ANTES DE LA INYECCIÓN

**INSPECCIONAR EL LÍQUIDO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA**  
Inspeccionar el líquido a través de la ventanilla. Comprobar cualquier cambio de color, enturbiamiento o partículas grandes. La solución debe ser un líquido claro entre amarillo y marrón.



### QUITAR EL TAPÓN

Girar y tirar del tapón para retirarlo. Mantener las manos lejos del protector de la aguja una vez se haya quitado el tapón. No volver a tapar. Tirar el tapón inmediatamente. No inyectar si se le cae el inyector precargado tras haber quitado el tapón.



**Inyectar en los 5 minutos posteriores a la retirada del tapón.**

## INYECCIÓN

### COLOCAR SOBRE LA PIEL

Coloque el inyector recto sobre la piel (aproximadamente a 90 grados).



### PRESIONAR EL MANGO HACIA ABAJO

Presione el mango hacia abajo. El medicamento se inyectará a medida que presiona. Hágalo a la velocidad que le sea más cómoda.



**No levante el inyector durante la inyección.**

### COMPLETAR LA INYECCIÓN

La inyección habrá finalizado cuando haya presionado el mango hasta el fondo, oiga un clic y ya no se vea el cuerpo naranja.



### LEVANTAR RECTO

La banda amarilla indica que el protector de la aguja está cerrado.



## ELIMINACIÓN

Deseche la pluma precargada usada en un contenedor de objetos punzantes aprobados.

No deseche la pluma en la basura doméstica.



El metotrexato no debe entrar en contacto con la superficie de la piel o la mucosa. En caso de contaminación, deberá aclararse inmediatamente la zona afectada con abundante agua.

### CON QUIÉN DEBE PONERSE EN CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD

Si tiene cualquier duda o problema, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

Si usted u otra persona de su entorno se lastiman con la aguja, consulte de inmediato a su médico y no utilice esta pluma precargada.